


SONDA NASOFARÍNGEA ATRAUMÁTICA MEDTECH
SNA-MedTech

Sonda Nasofaríngea Atraumática Medtech (SNA-Medtech) (Figura 1), é um dispositivo que permite a ventilação e administração de oxigênio através da via nasal, em procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina, acidentes e emergências.

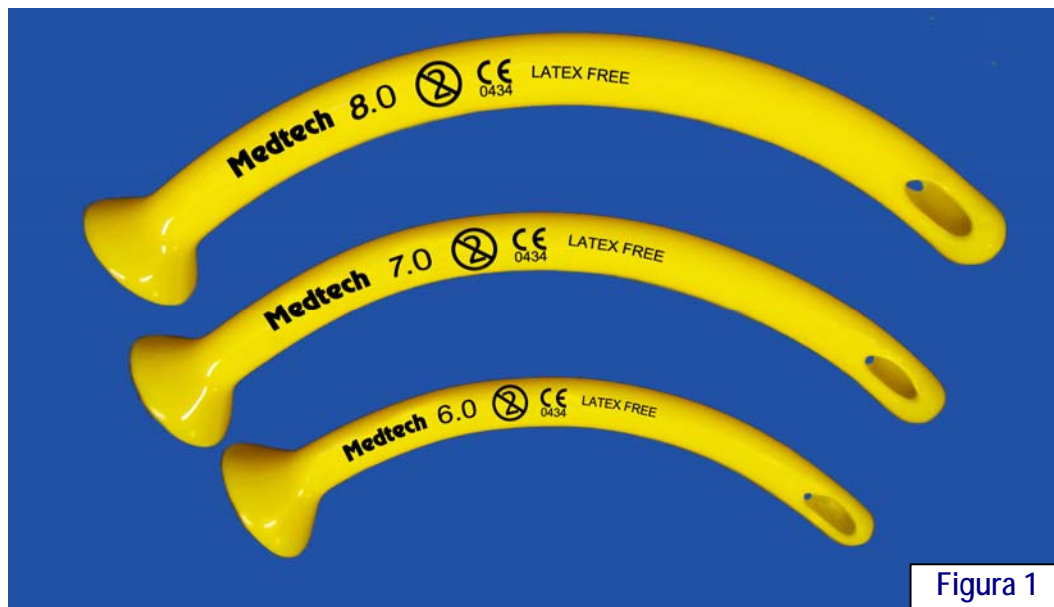

TAMANHOS: a **SNA-MedTech** é disponível em 3 tamanhos:

nº 6 (diâmetro interno de 6 mm)

nº 7 (diâmetro interno de 7 mm)

nº 8 (diâmetro interno de 8 mm)

Sonda Nasofaríngea Atraumática Medtech - estéril, descartável, isenta de látex

Apresentação: embalagem individual estéril, acompanha manual de uso;
caixas com 10 unidades embaladas individualmente.

Indicações da SNA-Medtech

A **SNA-Medtech** é utilizada durante procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina, acidentes, ou em emergências, principalmente quando a via orofaríngea estiver ocluída ou indisponível, permitindo assim a ventilação e a administração de oxigênio.

Onde a *SNA-MedTech* é utilizada?

No ambiente hospitalar, em todos os setores onde o paciente receba assistência respiratória:

- centro cirúrgico, pronto socorro, UTI, ressonância magnética...

No atendimento pré-hospitalar: - acidentes, serviços de resgate, ambulâncias.

Características da *SNA-MedTech*:

- **Cor contrastante** (amarelo brilhante) para melhor identificação;
- Fabricada em **material termolábil**, permitindo que sua conformação se molde à anatomia local, com melhor tolerância pelo paciente;
- **Ponta distal atraumática**, maciça e arredondada, para facilitar sua inserção;
- Extermidade distal com **dois orifícios laterais (Figura 2)** que conferem uma maior segurança na ventilação e permitem ainda a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração;
- **Rampa interna** para guiar a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração (**Figura 3**);
- **Borda proximal alargada** em forma de funil (**Figura 4**) para melhor posicionamento e fixação, de forma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda através da abertura nasal;
- Acompanha **alfinete de segurança** no caso de ser necessário um melhor ajuste no grau de introdução.



(Figura 2) Ponta distal atraumática, maciça e arredondada, para facilitar a inserção.

MedTech – Tecnologia Médica

Av. Senador Pinheiro Machado, 24, cj -11 CEP 11075-000 – Santos, SP

Tel. (013) 3234-1130 - Fax (013) 3223-5436

E-mail: medtech@medtech.com.br

Internet: <http://www.medtech.com.br>

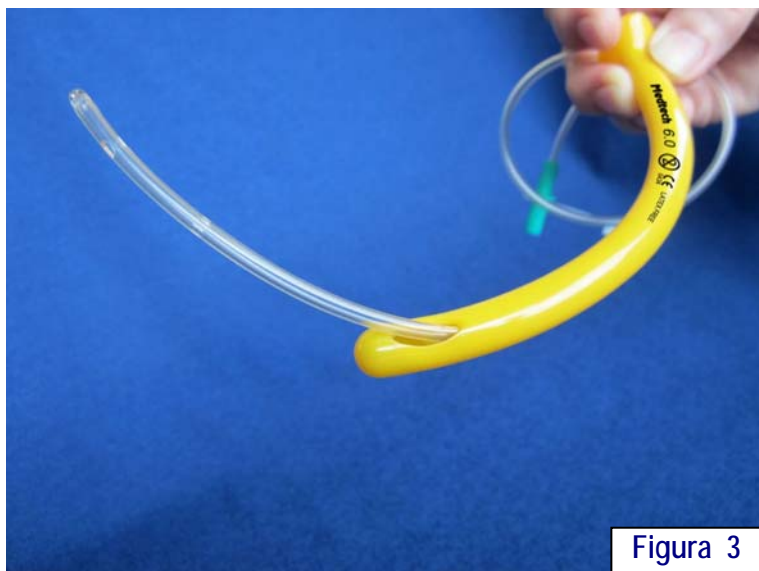


Figura 3

(Figura 3)

Conformação distal única da **SNA-MedTech** com rampa exclusiva para direcionar a passagem de uma sonda nasogátrica.



Figura 4

(Figura 4)

O formato afunilado da porção proximal da **SNA-MedTech**, auxilia no posicionamento final da sonda e ao mesmo tempo, impede que esta penetre em demasia através da abertura nasal de forma que possa se perder no interior do nasofaringe.

BORDA PROXIMAL alargada em funil:
 - facilita posicionamento
 - melhor estabilidade

INSTRUÇÕES DE USO:

- Escolher o **tamanho apropriado da SNA-Medtech**;
 - Abrir assepticamente a embalagem e retirar a **SNA-Medtech** de seu interior;
 - Introduzir delicadamente a sonda através da narina do paciente até que sua ponta atinja a faringe;
 - Se necessário, o grau de introdução da sonda na nasofaringe pode ser ajustado e limitado através do emprego de um *alfinete de segurança* (que acompanha o produto), usado para transfixar o tubo proximal da sonda, fixando-a sobre as narinas.
 - Após o uso a sonda deve ser retirada e descartada;
- Produto descartável: fabricante recomenda uso único..**

Importado e Distribuído com exclusividade por:



MedTech – Tecnologia Médica

Av. Senador Pinheiro Machado, 24, cj -11 CEP 11075-000 – Santos, SP
 Tel. (013) 3234-1130 - Fax (013) 3223-5436

E-mail: medtech@medtech.com.br

Internet: http://www.medtech.com.br

" EXCELÊNCIA como PADRÃO "